

Стандартный набор для введения

Трехпросветный катетер кратковременного использования для диализа Power-Trialysis

Код изделия	Длина катетера (см)	Удлинитель
5608150	15	Прямой
5608200	20	Прямой
5608240	24	Прямой
5608300	30	Прямой
5618120	12.5	Закругленный
5618150	15	Закругленный
5618200	20	Закругленный
5618240	24	Закругленный

Состав набора Power-Trialysis:

- Катетер Power-Trialysis – 1 штука
- Повязка на клейкой основе – 1 штука
- Расширитель DualaTor, 11–13 F – 1 штука
- Расширитель DualaTor, 12–14 F – 1 штука
- Колпачок – 3 штуки
- Проводник с J-образным кончиком – 1 штука
- Игла-интродьюсор 18G (1,2 мм) – 1 штука
- Крыльчатый фиксатор – 1 штука

► Изделие и упаковка не содержат натурального каучукового латекса

Узнайте больше

Чтобы получить больше информации о катетере кратковременного использования для диализа Power-Trialysis, свяжитесь с представителем BD Medical или посетите наш сайт www.bardaccess.com



Power-Trialysis®
катетер кратковременного использования для диализа

Трехпросветный катетер кратковременного использования для диализа Power-Trialysis

Усовершенствованные возможности для проведения экстренного диализа

Bard France S.A.S. (Франция, Северная Африка)
ФРАНЦИЯ Телефон:
+ 33 1 39 30 58 58 Факс: + 33 1 39 30 58 59
service.commande@crbard.com www.bardfrance.fr

Bard de Espana S.A. ИСПАНИЯ
Телефон: +34 93 253 7800 Факс: +34 93 253 7834
spain.customerservice@crbard.com

C. R. Bard Portugal L.D.A. ПОРТУГАЛИЯ
Телефон: +351 21 319 0330 Факс: +351 21 319 0339
Bard.Portugal@crbard.com

Bard S.p.A (Италия, Восточное Средиземноморье, Ближний Восток) ИТАЛИЯ
Телефон: + 39 06 524 93249 Факс + 39 06 529 58 52
customerservice.italia@crbard.com www.barditalia.it

Bard Hellas SA ГРЕЦИЯ
Телефон: + 30 210 96 90 780 1 Факс: + 30 210 96 28 810
Bard.Hellas@crbard.com

Bard Medica S.A. ШВЕЙЦАРИЯ
Телефон : +41 44 722 5360 Факс +41 44 722 5370
info-bce.access@crbard.com

Bard Czech Republic S.R.O. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Телефон: +420 242 408 630 Факс: +420 242 410 185
info-bce.access@crbard.com

C. R. Bard GmbH ГЕРМАНИЯ
Телефон: +49 721 9445 124 Факс: +49 721 9445 100
info-bce.access@crbard.com

Bard Poland Sp. z o.o. ПОЛЬША
Телефон: +48 22 321 0930
Бесплатный звонок 0800 494900
Факс: +48 22 321 0938
Бесплатный звонок 0800 4949011
info-bce.access@crbard.com

Bard Medica S.A. АВСТРИЯ
Телефон: +43 1 49 49 130 Факс: +43 1 49 49 130 30
info-bce.access@crbard.com

Bard Limited ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Телефон: +44 1293 527888 Факс: +44 1293 552428
customer.services@crbard.com www.barduk.com

ИРЛАНДИЯ
Телефон: +353 1 2130706 Факс: +353 1 2130604
customer.services@crbard.com

Bard Norden AB ШВЕДИЯ
Телефон: +46 42 38 60 00 Факс: +46 42 38 60 10
support.nordic@crbard.com

Bard Norway AS НОРВЕГИЯ
Телефон: +47 815 00 266 Факс: +47 815 00 299
support.nordic@crbard.com

Bard Denmark AB ДАНИЯ
Телефон: +45 49 26 20 08 Факс: +45 49 26 20 09
support.nordic@crbard.com

Bard Finland Oy ФИНЛЯНДИЯ
Телефон: +358 9 347 30 53 Факс: +358 9 347 10 07
support.nordic@crbard.com

Bard Medical SA (Pty) Ltd. ЮЖНАЯ АФРИКА
Телефон: +27 11 524 9900 Факс: +27 86 537 7250
www.bard.co.za

Bard Benelux N.V. БЕЛЬГИЯ
Телефон: +32 14 28 69 52 Факс: +32 14 28 69 66
custservicebelgium@crbard.com

НИДЕРЛАНДЫ
Телефон: +31 30 60 00 572 Факс: +31 30 60
custservicenederland@crbard.com

Данное медицинское изделие зарегистрировано в РФ (РУ N P3N 2016/4654).
См. инструкцию по медицинскому применению для получения информации о показаниях, противопоказаниях, опасностях, предупреждениях, предостережениях и инструкциях по применению.
Bard, Dualator и Power-Trialysis являются зарегистрированными товарными знаками C. R. Bard, Inc. или филиала. Все остальные товарные знаки являются собственностью их непосредственных владельцев.
Bard, Inc. Все права защищены 0811/3001



BD

BAIRD

has joined BD



BD

BAIRD

has joined BD

BD-60514



Катетер кратковременного использования для диализа разработан с учётом оптимальных характеристик производительности*

- ▶ Скорость потока до 400 мл/мин. при давлении менее 250 мм рт.ст. в просветах для диализа
- ▶ Разработан для отличного сопротивления перегибам
- ▶ Высокая пропускная способность за счёт двух круглых каналов, в отличие от других подобных устройств
- ▶ Рециркуляция во время нормального кровотока или в случае реверсирования артериального и венозного каналов в среднем составляет 2%

* неопубликованные данные

Скорость потока под воздействием гравитационной инфузии

Скорость потока под воздействием гравитационной инфузии (1 метр водяного столба)	
Длина	Скорость потока
30 см	2258 мл/час
24 см	2634 мл/час
20 см	2830 мл/час
15 см	3333 мл/час
12.5 см	3721 мл/час

Стержень 13 F изготовлен из термочувствительного полиуретана, который размягчается под воздействием температуры тела, но при этом сохраняет жесткость при введении

Наконечник мягче стержня

Симметричная конструкция наконечника сводит к минимуму рециркуляцию

Предназначен для внутривенной терапии, принудительного введения контрастного вещества и контроля центрального венозного давления

Полная длина катетера обеспечивает производительность подачи до 400 мл/мин.

Зажимы показывают объем заполнения


Крыльчатый фиксатор

Маркировка облегчает введение катетера на необходимую глубину

Гибкость и поддержка для Вас и Ваших пациентов

- ▶ Предназначен для гемодиализа, гемоперфузии и афереза
- ▶ Вариант исполнения с длиной 30 см для бедренного размещения
- ▶ Прямые и закругленные удлинители
- ▶ Третий просвет 17 Ga является независимым от диализных просветов, обеспечивая возможность дополнительного введения нескольких препаратов
- ▶ Предназначен для контроля центрального венозного давления
- ▶ Легко отличить от просветов для диализа
 - Полиуретановая трубка и коннектор отличительного лилового цвета, дополнительный ход годится для высокотоочной инфузии
 - Удлинитель с маркировкой «Power Injectable»*

* Высокопоточная инфузия

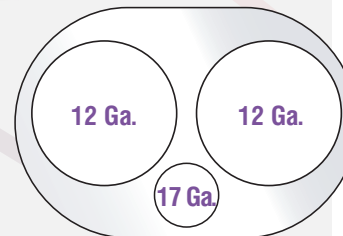

Большой третий канал

Стандартный уход

The Power of Purple™

- ▶ **Максимальная скорость введения** — позволяет вводить контрастные вещества со скоростью до 5 мл/сек.
- ▶ **Простая идентификация** — чётко обозначенный дистальный просвет и трубки лилового цвета отличаются от диализных просветов
- ▶ **Легко читаемые идентификационные метки** — указывают максимальную скорость введения и предлагают пользователям проверить проходимость катетера

Характеристики изгибания

- ▶ Овальный стержень катетера 13 F предназначен для сопротивления перегибанию
- ▶ Катетер более устойчив к изломам, чем другие трехпросветные диализные катетеры 12 F



POWER TRIALYSIS® 13 F



Другой катетер 12 F